

# Brugsinstruktion


## Extension 5.5L

Dansk version  
REV 00/2019




## Monteringsinstruktion

1. Læg låget på beholderen og tryk ned på lågets kant indtil du hører seks klik.

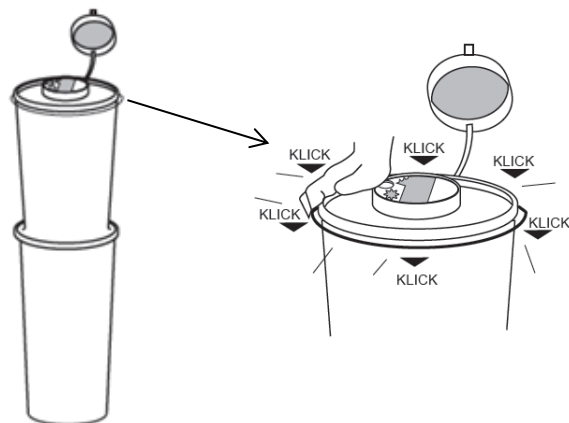


## Brugsinstruktion

1. Leur Lock
2. Ekstra plads
3. Insulinpen
4. QuickFit

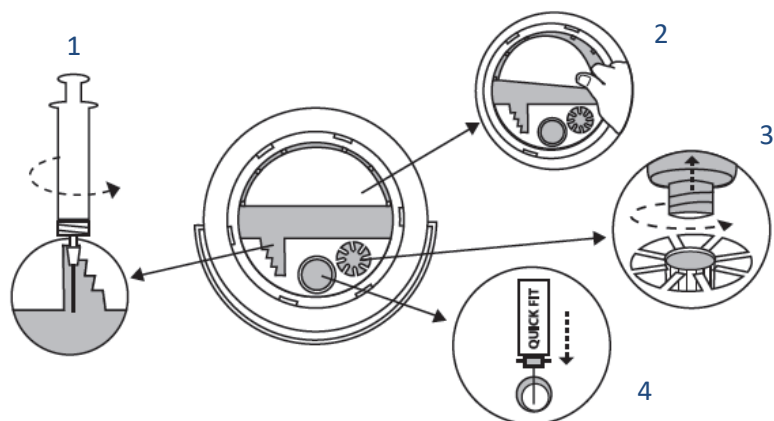


## Lukningsinstruktion

- 1. Midlertidigt lukning:**  
Tryk ned på det lille låg  
indtil du hører et klik.

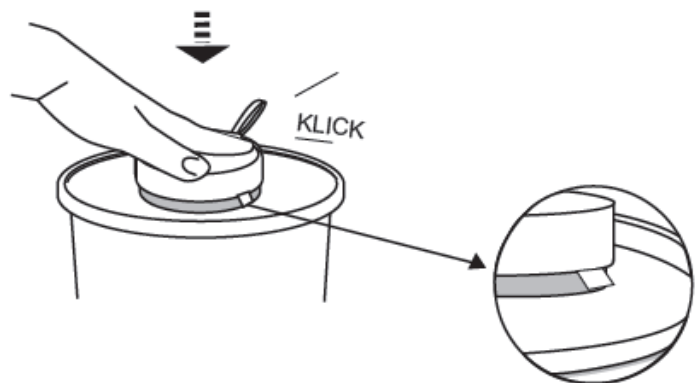

- 2. Permanenttætning:**  
Tryk ned på det lille låg  
indtil du hører to klik.  
Indikatoren vises.

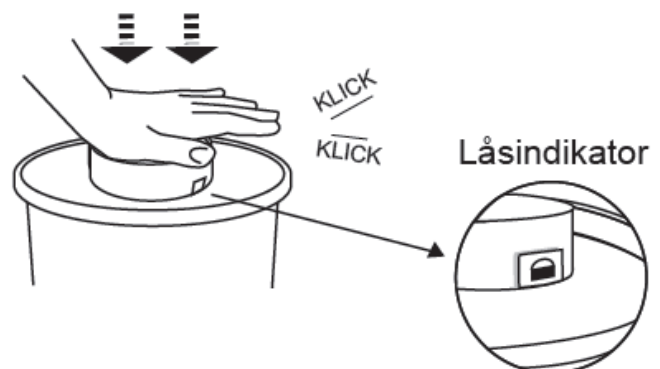

## Tilbehør

			
<b>Beskrivelse:</b> Bordholder med fastgørelsevakuum, holder i rustfrit stål, glasfiberforstærket PVC og PC	<b>Beskrivelse:</b> Bordholder med fastgørelsevakuum og bajonetgreb glasfiberforstærket PVC og PC	<b>Beskrivelse:</b> Vægmonteret holder, rustfrit stål	<b>Beskrivelse:</b> Holder for at hænge, rustfrit stål
<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st (ramme og holdere)
<b>Varenumre:</b> 6285-00	<b>Varenumre:</b> 6255-6254	<b>Varenumre:</b> 6282-00	<b>Varenumre:</b> 6282-01

		
<b>Beskrivelse:</b> Vognholder i rustfrit stål	<b>Beskrivelse:</b> Bordholder med skruer, glasforstærket PC	<b>Beskrivelse:</b> Vægholder/Vognholder i rustfrit stål
<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st
<b>Varenumre:</b> 6282-02	<b>Varenumre:</b> 6255-6272	<b>Varenumre:</b> 6253/6253-6260

## Andet

Alle data henviser til individuelle værdier og er produkt for eventuelt ændringer.  
Copyright © AB Sundplast

[www.safebox.eu](http://www.safebox.eu)  
[www.sundplast.com](http://www.sundplast.com)

AB Sundplast  
Box 15084  
25015 Helsingborg  
Sverige