

Brugsinstruktion

Holder til Mini Vital og Extention

Dansk version
REV 00/2019



Holder for vægmontering

1. Monter holder på væg
2. Sæt Kanyleboks i holder med låget oppe



Holder til at hænge

1. Monter krog på holder
2. Sæt Kanyleboks i holder med låget oppe



Holder til vogn

1. Monter speciel stykke på holder
2. Monter herefter på vogn
3. Sæt Kanyleboks i holder med låget oppe



Andet

1. Alle holder er produceret i rustfri stål

www.safebox.eu

www.sundplast.com

AB Sundplast

Box 15084

25015 Helsingborg

Sverige